

2025 年第一次能力验证计划指导书

全省血液及尿液检验室间质评活动注意事项

全省血液及尿液检验室间质评第一次活动已开始,此次寄去你单位临检参加项目质控物 5 个批号。用你室常规方法测定。全部结果在活动的截止日期前**从检验中心网站 EQA 系统网络直报,不要发电子邮件或书面邮寄。超过停报截止日期按缺勤对待。**各实验室应自觉开展室内质控,[并将当月室内质控图以电子版形式发往 gsccl.eqa@163.com](mailto:gsccl.eqa@163.com)信箱(可照成照片,做成压缩文件,注明单位),否则失去评价资格。

一 全血质控物使用方法及注意事项

- 1 收到质控物后,应立即保存在 $2^{\circ}\text{C}-8^{\circ}\text{C}$, 严禁冰冻。使用全程应防止污染,用前应拭净瓶口,取样后尽快盖好瓶塞。每次用前充分混匀,用力适度,防止起泡。
- 2 使用前,将其置室温下使达到室内温度。
- 3 颠倒混匀 5 分钟,切勿用力振摇,避免异物掉入。拭净瓶口,轻启瓶盖。
- 4 按你室常规方法测定,4 小时之内测定完毕。使用仪器的实验室, 请将 RBC、Hb、WBC、Plt、Hct、MCV、MCH、MCHC 八项予以回报。

二 凝血酶原冻干质控物使用方法及注意事项

- 1 用 1.0 毫升重蒸水复溶质控物,轻微颠倒混匀,不可用力。含钙冻干组织凝血活酶自备,回报时注明其 ISI 值。
- 2 正常参比血浆请自行制备。抽血量与抗凝剂比例要准确(1.8ml 和 109mmol/L 枸橼酸钠 0.2ml 混合,采集后立即测定(若需储存,于 4°C 内不得超过 6 小时))。
- 3 水浴温度控制在 $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, 过高过低均影响测定结果。
- 4 按《全国临床检验操作规程》流程进行测定,每份样本测定三次,取均值报告。使用仪器的实验室,参照仪器说明书进行测定。
- 5 将测定的 PT、APTT、Fb 和 INR 四项予以回报。
- 6 报告方式: $\text{INR} = X^{\text{C}}$ 。其中 X=待测血浆的 PT 时间/正常参比血浆的平均 PT 时间。C 为所用的组织凝血活酶 ISI 值。

三 尿液冻干质控物使用方法及注意事项

- 1 本质控物可对尿 PH、PRO、GLU、BLD、KET、BIL、NIT、URO、WBC、比重 10 个项目进行检测。使用时用所发的 10ml 复溶液复溶,塞上瓶盖颠倒几次,使充分溶解。然后将瓶内质控液注入 $15 \times 100\text{mm}$ 试管内,即可测定。
- 2 注意将质控液和试纸条恢复到室温再进行测定,否则结果将受影响。回报时注明

四 粪便潜血质控物使用方法及注意事项

见包装说明书

五 D-D、FDP 质控物使用方法及注意事项

见包装说明书

测定日期：2025 年 4 月 30 日–2025 年 5 月 15 日. 网报截止日为 2025 年 5 月 25 日。

全血质控物批号：2025101，2025102，2025103，2025104，2025105
PT 质控物批号： 2025101，2025102，2025103，2025104，2025105
尿液质控物批号：2025101，2025102，2025103，2025104，2025105
粪便潜血质控物批号： 2025101，2025102，2025103，2025104，2025105
D-D、FDP 质控物批号：2025101，2025102，2025103，2025104，2025105

血细胞图谱、尿沉渣图谱： 全年两次共 20 个图片（从省临检中心网站www.gsccl.org 【相关下载】 任务栏下载）
相关编码表格请从省临检中心网站www.gsccl.org 【相关下载】 任务栏下载 。网站【最新公告】处有进入 EQA 室间质评系统的详细说明，请仔细阅读。

血细胞计数使用仪器编码务必按表 1 填写

表 1:

编码	仪器厂家名称
109901	sysmex3 分类系列
109902	sysmex5 分类系列
109903	迈瑞 3 分类系列
109904	迈瑞 5 分类系列
109905	日本光电系列
109906	其他组
109908	帝迈五分类系列
119910	迈克 F 系列
119909	中元汇吉 Z5

凝血实验、务必按表 2 填写

表 2:

编码	试剂、校准物厂家名称
119901	使用德灵试剂组
119902	使用太阳试剂组
119903	使用世帝试剂组
119904	使用美创试剂组
119905	使用其他试剂组
119906	使用 stago 试剂组
119907	使用 BE 试剂
119908	使用赛科希德试剂组
119909	标佳生物
119910	Dade Actin FSL 试剂组

- 119911 上海长岛试剂
- 119912 深圳雷杜系列血凝试剂
- 119913 四川迈克试剂
- 119914 中元汇吉
- 119915 质控二组
- 119916 希肯试剂

D-D 使用试剂编码务必按表 3 填写

表 3

编码	试剂、校准物厂家名称
119921	使用德灵试剂组
119922	使用太阳试剂组
119923	使用世帝试剂组
119924	使用美创试剂组
119925	使用其他试剂组
119926	使用 stago 试剂组
119927	使用 BE 试剂
119928	使用赛科希德试剂组
119929	标佳生物
119930	Dade Actin FSL 试剂组
119931	上海长岛试剂
119932	积水试剂组
119933	希肯试剂组
119934	希森美康百奥灵试剂组

FDP 使用试剂编码务必按表 4 填写

编码	试剂、校准物厂家名称
119941	使用德灵试剂组
119942	使用太阳试剂组
119943	使用世帝试剂组
119944	使用美创试剂组
119945	使用其他试剂组
119946	使用 stago 试剂组
119947	使用 BE 试剂
119948	使用赛科希德试剂组
119949	标佳生物
119950	Dade Actin FSL 试剂组
119951	上海长岛试剂
119952	积水试剂组
119953	希森美康百奥灵试剂组