

甘肃省临床检验中心

2026 年全省粪便隐血室间质评活动指导书

一、评价项目

1. 2026 年全省粪便隐血室间质量评价活动全年开展两次，每次 5 个样品，分 2 次邮寄。
2. 评价项目：粪便隐血 1 个项目。

二、时间安排

活动次数	批号	样本建议测定日期	结果上报截止日期	质评成绩下发日期
第1次	202611、202612、202613、202614、202615	2026年7月20日	2026年8月3日	2026年8月17日
第2次	202621、202622、202623、202624、202625	2026年9月20日	2026年9月30日	2026年10月20日

备注：用你室常规方法测定。全部结果在活动的截止日期前从检验中心网站 EQA 系统网络直报，不要发电子邮件或书面邮寄。超过停报截止日期按缺勤对待。

三、样本说明

1. 样品状态 待测样本为购买的商品化产品，生产商为深圳贝索生物。样品特性为冻干粉。
2. 样品数量：第 1 次室间质评样品数量 5 支，批号为 202611、202612、202613、202614、202615；第 2 次室间质评样品数量 5 支，批号为 202621、202622、202623、202624、202625。
3. 存储条件 如 2-8℃保存，平衡至室温；按下表要求加入纯化水、蒸馏水或者粪便隐血检测试剂内附的样品稀释液。

四、粪便隐血室间质评物使用方法及注意事项

1. 开启容器前应佩戴手套，在样品处理期间应一直佩戴。若手套破损或被污染，应更换手套。摘除手套后和离开试验区前应洗手。
2. 严禁在实验室内用餐、饮水或吸烟。
3. 海拔高时，样品应在防护罩或生物安全柜中开启。
4. 所有样品和试剂应与其他含有输注用血液或血液成分的样本分开保存。

5. 当发生意外暴露，包括伤口和粘膜或不完整皮肤的污染时，应按照实验室意外暴露应急方案处理。
6. 关于我中心EQA 流程，可参阅当年的《2026年甘肃省临床检验室间质量评价注册说明书》；
7. 若发现室间质评样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题，影响测定或结果填报时， 请电话联系补寄。
8. 当年新参加单位，用户名和密码均为您的实验室编码。为保证您实验室信息安全，请尽快登 录网站（<https://www.gsccl.cn>）修改密码。
9. 室间质评成绩不合格时，应及时查找原因并采取纠正措施。
10. 每次在网上填写结果和编码时，应仔细审核，没有问题后再发送，提示发送成功后，**必须到已上报数据栏进行结果的确认（必须步骤）**。
11. 投诉及申诉处理流程：我中心接收参加者通过电话提出的诉求后，由项目负责人及时记录基本信息，对有效投诉或申诉全面调查原因，填写《参加者投诉及处理记录》或《参加者申诉及处理记录》，通过电话向投诉人反馈结果。投诉及申诉电话：0931-8281034。

五、联系方式

联 系 人：杨永清

联络地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 204 号

联系电话：0931-8281229

甘肃省临床检验中心

2026 年 7 月