

甘肃省临床检验中心

2026 年全省 D-D 和 FDP 室间质评活动指导书

一、评价项目

1. 2026 年全省 D-D 和 FDP 室间质量评价活动全年开展两次，每次 5 个样品，分 2 次邮寄。
2. 评价项目：D-二聚体及纤维蛋白（原）降解产物项目检测的室间质量评价活动。

二、时间安排

活动次数	批号	样本建议测定日期	结果上报截止日期	质评成绩下发日期
第1次	202611、202612、202613、202614、202615	2026年7月20日	2026年8月3日	2026年8月17日
第2次	202621、202622、202623、202624、202625	2026年9月20日	2026年9月30日	2026年10月20日

备注：用你室常规方法测定。全部结果在活动的截止日期前从检验中心网站 EQA 系统网络直报，不要发电子邮件或书面邮寄。超过停报截止日期按缺勤对待。

三、样本说明

1. 样品状态本次能力验证使用的待测样本为购买的商品化产品，生产商为昆涞生物。样品特性为冻干粉剂。
2. 样品数量：第 1 次室间质评样品数量 5 支，批号为 202611、202612、202613、202614、202615；第 2 次室间质评样品数量 5 支，批号为 202621、202622、202623、202624、202625。
3. 存储条件：室间质评样品放入 2-8℃冷库保存。
4. D-D 和 FDP 使用仪器编码务必按表 1 填写。

表 1 D-D 和 FDP 使用试剂编码

编码	试剂、校准物厂家名称
119941	使用德灵试剂组
119942	使用太阳试剂组
119943	使用世帝试剂组
119944	使用美创试剂组
119945	使用其他试剂组
119946	使用stago试剂组
119947	使用BE试剂

119948	使用赛科希德试剂组
119949	标佳生物
119950	Dade Actin FSL试剂组
119951	上海长岛试剂
119952	积水试剂组
119953	希森美康百奥灵试剂组

四、D-D和FDP质控物使用方法及注意事项

1. 本样品为冻干态, 使用前用1.0mL蒸馏水溶解。
2. 样品从要求储存环境中取出, 放置室温(18℃~25℃)平衡至少30分钟。按要求用蒸馏水溶解后, 轻轻颠倒数次, 使其充分混匀, 不要振摇, 避免产生气泡: 小心开启瓶盖, 进行检测。
3. 参考相应试剂盒的说明书, 将样品等同于临床样本进行检测, 根据试剂盒操作方法完成实验, 并在相应检测设备上读取检验结果。
4. 样品应于2℃~8℃条件下储存, 有效期24个月。
5. 样品复溶后在2℃~8℃密封保存可稳定14天; 复溶后如需长期使用, 建议进行分装并于0℃以下冷冻保存, 可稳定30天, 反复冻融不超过1次。
6. 本品均采取灭活措施使其无传染性, 但具有潜在感染性。应采用与临床样本相同的防范措施进行处理, 按照实验室生物安全防护指南要求操作。
7. 超过有效期的本品不能再使用。
8. 关于我中心EQA 流程, 可参阅当年的《2026年甘肃省临床检验室间质量评价注册说明书》;
9. 若发现室间质评样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题, 影响测定或结果填报时, 请电话联系补寄。
10. 当年新参加单位, 用户名和密码均为您的实验室编码。为保证您实验室信息安全, 请尽快登录网站(<https://www.gsccl.cn>)修改密码。
11. 室间质评成绩不合格时, 应及时查找原因并采取纠正措施。
12. 每次在网上填写结果和编码时, 应仔细审核, 没有问题后再发送, 提示发送成功后, 必须到已上报数据栏进行结果的确认(必须步骤)。
13. 投诉及申诉处理流程: 我中心接收参加者通过电话提出的诉求后, 由项目负责人及时记录基本信息, 对有效投诉或申诉全面调查原因, 填写《参加者投

诉及处理记录》或《参加者申诉及处理记录》，通过电话向投诉人反馈结果。
投诉及申诉电话：0931-8281034。

五、联系方式

联 系 人：杨永清

联络地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 204 号

联系电话：0931-8281229

甘肃省临床检验中心

2026 年 7 月