

甘肃省临床检验中心

2026 年全省尿液干化学分析（卫生院）室间质评活动指导书

一、评价项目

1. 2026 年全省卫生院尿液干化学分析室间质量评价活动全年开展两次，每次 5 个样品，分 2 次邮寄。
2. 评价项目：尿液干化学分析中尿 PH、PRO、GLU、BLD、KET、BIL、NIT、URO、WBC、比重 10 个项目。

二、时间安排

活动次数	批号	样本建议测定日期	结果上报截止日期	质评成绩下发日期
第1次	W202611、W202612、W202613、W202614、W202615	2026年7月20日	2026年8月3日	2026年8月17日
第2次	W202621、W202622、W202623、W202624、W202625	2026年9月20日	2026年9月30日	2026年10月20日

备注：用你室常规方法测定。全部结果在活动的截止日期前从检验中心网站 EQA 系统网络直报，不要发电子邮件或书面邮寄。超过停报截止日期按缺勤对待。

三、样本说明

1. 样品状态 待测样本为购买的商品化产品，生产商为爱威生物。样品特性为液体。
2. 样品数量:第 1 次室间质评样品数量 5 支,批号为 W202611、W202612、W202613、W202614、W202615;第 2 次室间质评样品数量 5 支,批号为 W202621、W202622、W202623、W202624、W202625。
3. 存储条件 室间质评样品放入 2-8℃冷库保存。

四、尿液干化学室间质评物使用方法及注意事项

1. 本质控物可对尿PH、PRO、GLU、BLD、KET、BIL、NIT、URO、WBC、比重10个项目进行检测。使用时用所发的10ml复溶液复溶，塞上瓶盖颠倒几次，使充分溶解。然后将瓶内室间质评样品注入15×100mm试管内，即可测定。

2. 室间质评样品检测时, 应按日常病人检测样品处理方式处理, 由日常工作人员使用实验室常规检测系统 (仪器、试剂和方法等) 检测, 检测次数应与常规检测病人样本的次数相同。
3. 注意将质控液和试纸条恢复到室温再进行测定, 否则结果将受影响。回报时注明。
4. 关于我中心 EQA 流程, 可参阅当年的《2026年甘肃省临床检验室间质量评价注册说明书》;
5. 若发现室间质评样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题, 影响测定或结果填报时, 请电话联系补寄。
6. 当年新参加单位, 用户名和密码均为您的实验室编码。为保证您实验室信息安全, 请尽快登录网站 (<https://www.gsccl.cn>) 修改密码。
7. 室间质评成绩不合格时, 应及时查找原因并采取纠正措施。
8. 每次在网上填写结果和编码时, 应仔细审核, 没有问题后再发送, 提示发送成功后, 必须到已上报数据栏进行结果的确认 (必须步骤)。
9. 投诉及申诉处理流程: 我中心接收参加者通过电话提出的诉求后, 由项目负责人及时记录基本信息, 对有效投诉或申诉全面调查原因, 填写《参加者投诉及处理记录》或《参加者申诉及处理记录》, 通过电话向投诉人反馈结果。投诉及申诉电话: 0931-8281034。

五、联系方式

联系人: 杨永清

联络地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路 204 号

联系电话: 0931-8281229

甘肃省临床检验中心

2026 年 7 月