

甘肃省临床检验中心

2026 年全省全血细胞计数（卫生院）室间质评活动指导书

一、评价项目

1. 2026 年全省卫生院全血细胞计数室间质量评价活动全年开展两次，每次 5 个样品，分 2 次邮寄。
2. 评价项目：全血细胞计数 RBC、Hb、WBC、Plt、Hct、MCV、MCH、MCHC 八项。

二、时间安排

活动次数	批号	样本建议 测定日期	结果上报 截止日期	质评成绩 下发日期
第1次	W202611、W202612、 W202613、W202614、 W202615	2026年7月20日	2026年8月3日	2026年8月17日
第2次	W202621、W202622、 W202623、W202624、 W202625	2026年9月20日	2026年9月30日	2026年10月20日

备注：用你室常规方法测定。全部结果在活动的截止日期前从检验中心网站 EQA 系统网络直报，不要发电子邮件或书面邮寄。超过停报截止日期按缺勤对待。

三、样本说明

1. 样品状态本次能力验证使用的待测样本为购买的商品化产品，生产商为四川新健康成。样品特性为液体。
2. 样品数量每次室间质评样品数量 5 支，第一次批号为 W202611、W202612、W202613、W202614、W202615；第 2 次室间质评样品数量 5 支，批号为 W202621、W202622、W202623、W202624、W202625。
3. 存储条件 室间质评样品放入 2-8℃冷库保存。
4. 全血细胞计数使用仪器编码务必按表 1 填写。

表 1 全血细胞计数使用仪器编码

编码	仪器厂家名称
639901	sysmex3分类系列
639902	sysmex5分类系列
639903	迈瑞3分类系列
639904	迈瑞5分类系列
639905	日本光电系列

639906	其他组
639907	质控2组
639908	帝迈五分类系列
639909	迈克F系列
639910	中元汇吉Z5

四、全血细胞计数质控物使用方法及注意事项

1. 收到质控物后，应立即保存在2℃-8℃，严禁冰冻。使用全程应防止污染，用前应拭净瓶口，取样后尽快盖好瓶塞。每次用前充分混匀，用力适度，防止起泡。
2. 使用前，将其置室温下使达到室内温度。
3. 颠倒混匀5分钟，切勿用力振摇，避免异物掉入。拭净瓶口，轻启瓶盖。
4. 按你室常规方法测定，4小时之内测定完毕。使用仪器的实验室，请将RBC、Hb、WBC、Plt、Hct、MCV、MCH、MCHC八项予以回报。
5. 关于我中心 EQA 流程，可参阅当年的《2026年甘肃省临床检验室间质量评价注册说明书》；
6. 若发现室间质评样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题，影响测定或结果填报时， 请电话联系补寄。
7. 当年新参加单位，用户名和密码均为您的实验室编码。为保证您实验室信息安全，请尽快登 录网站（<https://www.gsccl.cn>）修改密码。
8. 室间质评成绩不合格时，应及时查找原因并采取纠正措施。
9. 每次在网上填写结果和编码时，应仔细审核，没有问题后再发送，提示发送成功后，必须到已上报数据栏进行结果的确认（必须步骤）。
10. 投诉及申诉处理流程：我中心接收参加者通过电话提出的诉求后，由项目负责人及时记录基本信息，对有效投诉或申诉全面调查原因，填写《参加者投诉及处理记录》或《参加者申诉及处理记录》，通过电话向投诉人反馈结果。投诉及申诉电话：0931-8281034。

五、联系方式

联 系 人：杨永清

联络地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 204 号

联系电话：0931-8281229

甘肃省临床检验中心

2026 年 7 月