

甘肃省临床检验中心

2026 年 POCT 血糖室间质量评价（能力验证）

活动安排及注意事项

一、评价项目与时间表

2026 年便携式 (POCT) 血糖检测仪室间质量评价将进行 1 次活动（共 5 个批号样品），测定项目为葡萄糖。

活动次数	批号	样品建议 测定日期	结果上报 截止日期	质评成绩 下发日期
全年 1 次	202611、202612、202613、202614、202615	2026年7 月20 日	2026年8月 3 日	2026年8 月 17 日

注:为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样品保存：2℃~8℃，避光！

三、样品处理

本次能力验证使用的质评样本性状为冻干粉材质，包装规格为5*2mL。为了避免污染，破损等意外造成的生物安全问题，采用三层包装。测定前将样本从冰箱取出，准确加入 2.0ml 去离子水或蒸馏水，加盖室温放置 30 分钟，轻轻混匀至完全溶解后取样测定。样品复溶后在2℃~30℃密封保存可稳定90天。未开瓶，2~8可保存至效期末。

质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

四、注意事项

1. 关于我中心 EQA 流程，可参阅当年的《2026年甘肃省临床检验室间质量评价注册说明书》；
2. 若发现室间质评样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题，影响测定或结果填报时， 请电话联系补寄。
3. 当年新参加单位，用户名和密码均为您的实验室编码。为保证您实验室信息安全，请尽快登 录网站（<https://www.gsccl.cn>）修改密码。
4. 室间质评成绩不合格时，应及时查找原因并采取纠正措施。
5. 每次在网上填写结果和编码时，应仔细审核，没有问题后再发送，提示发送成功后，必须到已上报数据栏进行结果的确认（必须步骤）。
6. 投诉及申诉处理流程：我中心接收参加者通过电话提出的诉求后，由项目负责人及时记录基本信息，对有效投诉或申诉全面调查原因，填写《参加者投诉及处理记录》或《

参加者申诉及处理记录》，通过电话向投诉人反馈结果。投诉及申诉电话：0931-8281034。

五、联系方式

室间质评活动中的专业问题可与临床生化室联系：

联系人：刘婧、颜丽

电话：0931-8281226.

甘肃省临床检验中心

2026 年 7 月